




## Sangue Occulto nelle Feci

**Raccolta e consegna del campione** - I campioni di feci, provenienti dai reparti di degenza o dall'esterno, sono raccolti utilizzando appositi dispositivi forniti dal Laboratorio Analisi, seguendo le istruzioni riportate sull'opuscolo informativo allegato ("SENTIFIT PIERCE TUBE" COD. REF. 1156188

### PROCEDURA DI RACCOLTA DEL CAMPIONE

SENTINEL  
CH. SPA).

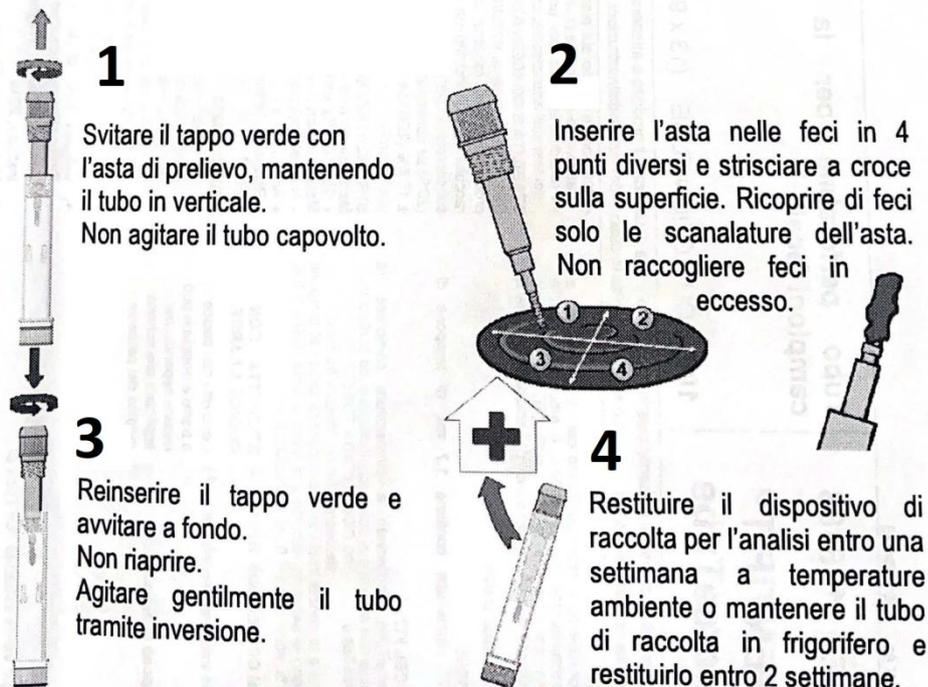

**Stabilità del campione** - Il campione di feci, raccolto utilizzando l'apposito dispositivo, è stabile per 7 giorni a temperatura ambiente (+28-32°C) e per 14 giorni a circa +2-8°C.

**Precauzioni generali-** **A)** tenere il tubo fuori dalla portata dei bambini **B)** il liquido contenuto nel tubo del dispositivo non deve essere ingerito e non deve entrare in contatto con gli occhi o con le mucose **C)** Effettuare il prelievo immediatamente dopo la defecazione **D)** se richiesto notare le seguenti informazioni sulle etichette del tubo (data raccolta, N° campione, nome paziente) **E)** non inserire il tubo o parte di esso nell'ano **F)** non effettuare la raccolta delle feci in caso di diarrea, durante le mestruazioni, in caso di sanguinamento del retto (ad es. emorroidi o altre cause) o se contaminate dall'urina **G)** Utilizzare il dispositivo una sola volta.

**Metodo analitico** - Per l'esecuzione della ricerca del sangue occulto (emoglobina fecale) nelle feci si utilizza il metodo analitico **Sof (Sangue occulto fecale) Immunologico al lattice con lettura in turbidimetria**, indicato come migliore in riferimento alla sensibilità e specificità.

**Valore soglia adottato** - 100 ng/ml.

**Risultati** - <100 ng/ml = negativo;  
>100 ng/ml = positivo, si inserisce dato quantitativo espresso in ng/ml.